

氣囊擠壓調整法操作說明 — 適用於體重低於 70 公斤的使用者 — ROHO® 座墊*

* 此調節方式僅適用於下列型號：

- ROHO 單區室座墊 (10.5cm 或 8.5cm)
- ROHO 單區室座墊，採用 Sensor Ready® 技術 (10.5cm 或 8.5cm)
- ROHO QUADTRO SELECT® 四邊可調座墊 (10.5cm 或 8.5cm)
- ROHO CONTOUR SELECT® 四邊可調體適型座墊
- ROHO ENHANCER® 雙區座墊

警告：此調節方式**不適用於** ROHO Hybrid Elite® 座墊、ROHO Hybrid Select 座墊、ROHO 單氣室 5.5cm 座墊、ROHO 單氣室 5.5cm 座墊 Sensor Ready® 技術、ROHO QUADTRO Select® 5.5cm 座墊或 Smart Check® 座墊監控裝置。

重要提示！應由具坐姿擺位經驗的臨床專業人員確認這種替代性充氣方法是否適合個人的坐姿需求。如需標準調節方式說明及其他設定、安全和保養資訊，請參閱座墊隨附的說明書。

警告：充氣時請勿在座墊上施加任何重量。

將座墊充氣後放氣至氣囊內壓力與大氣壓力一致

重要提示！對於 QUADTRO SELECT 和 CONTOUR SELECT 座墊：

充氣前，您必須先解鎖 ISO Flo 記憶控制，以便所有的氣囊能夠充氣。按下綠色旋鈕以解鎖 ISO Flo 記憶控制。(圖 1)

注意：ISO Flo 記憶控制可透過座墊套前端的開口直接操作。

- 取下或掀開座墊套，以便露出及調整最後兩排氣囊。
- 將手動打氣筒接上 Zytel 氣嘴。(圖 2)
- 逆時針旋轉氣嘴，鬆開充氣閥。(圖 3)
- 使用打氣筒將座墊充氣，直到所有氣囊都呈現飽滿的狀態。
- 取下打氣筒，讓空氣從氣嘴自然泄出（直到與大氣壓力呈現均壓）。
建議：細聽 (或將手放在充氣閥前) 以確認空氣的泄出已經停止。
- 將最後兩排氣囊中的空氣向下擠壓，直到氣囊中的空氣全部排出座墊外。(圖 4)
建議：可使用手臂協助按壓或擠壓最後 2 排。
- 順時針擰緊氣嘴，關閉充氣閥。(圖 5)



圖 1


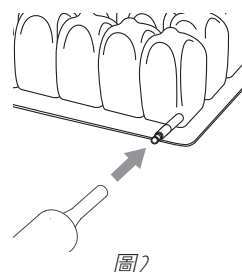


圖 2

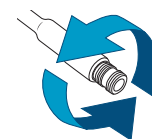

開啟

圖 3


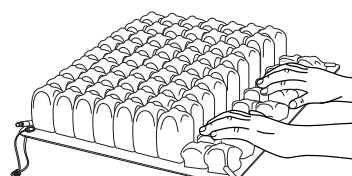


圖 4

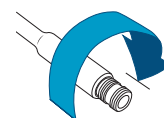

關閉

圖 5

重要提示！ Select 和 ENHANCER 座墊：

- 針對 Enhancer 座墊：對第二個氣嘴重複步驟 2 至 7，確保最後兩排的所有氣囊都已放氣。
- Select 與 ENHANCER 座墊可能配置有多個氣嘴和分區，而需要針對使用者進行額外的擺位和調整。請參閱隨附的座墊說明書。

完成設置

- 將座墊放回座墊套內，請參閱座墊套的說明書。
- 將座墊放在輪椅上，氣囊朝上，座墊套的防滑面朝下。依照座墊套上的坐姿符號，定位正確的座墊擺放方向。
- 使用者轉移位到輪椅上，保持正常坐姿。確保座墊位於人體下方的中心位置。

