

# Laddningsguide

Din rullstol är utrustad med underhållsfria AGM-batterier från Permobil. Det innebär att du behöver ladda batterierna regelbundet; inget annat underhåll krävs. Det enklaste är att ladda rullstolen varje kväll/natt när du har kört färdigt för dagen och den är parkerad.

För att ladda, koppla laddarens kontakt till ladduttaget i rullstolens joystick eller panel alternativt det externa ladduttaget. Anslut därefter laddarens stickkontakt i vägguttaget. Laddningen startar automatiskt.

För bästa resultat bör laddning och förvaring av rullstolen ske i normal inomhustemperatur, ca 20°C. Vid kallare temperaturer kan laddningen ta längre tid, och batteriets kapacitet påverkas, vilket kan minska körsträckan per laddning.



Laddaren sköter laddningen automatiskt och behöver inte övervakas. Den ska heller inte vara ansluten till ett uttag med timer. När laddningen är färdig lyser alla fyra lamporna på laddaren. Du kan låta laddaren vara ansluten tills du ska använda rullstolen nästa gång.

När du ska avsluta laddningen, koppla först bort stickkontakten från vägguttaget och därefter laddkontakten från din rullstol.



OBS! Laddning bör normalt pågå i minst 8 timmar. Helt urladdade batterier tar cirka 12 timmar att ladda fullt. Avbryt inte pågående laddning förrän den är färdig och alla fyra lamporna på laddaren lyser.

Om rullstolen sällan eller aldrig används så mycket att batterinivån sjunker under 50%, bör du en gång per vecka köra stolen extra mycket så att batterinivån når det röda området innan du laddar.

