

Vejledning til opladning

Din kørestol er udstyret med vedligeholdelsesfrie AGM-batterier fra Permobil. Det betyder, at du skal oplade batterierne regelmæssigt – andet vedligehold er ikke nødvendigt. Det nemmeste er at oplade kørestolen hver aften/nat, når du er færdig med at køre for dagen, og den er parkeret.

For at oplade: Tilslut opladerens stik til ladeudtaget i kørestolens joystick, panel eller det eksterne ladeudtag. Tilslut derefter opladerens stikprop til stikkontakten. Opladningen starter automatisk.

For det bedste resultat bør opladning og opbevaring af kørestolen ske ved normal stuetemperatur, ca. 20°. Ved lavere temperaturer kan opladningen tage længere tid, og batteriets kapacitet kan påvirkes, hvilket kan reducere rækkevidden pr. opladning.



Opladeren styrer opladningen automatisk og behøver ikke overvågning. Bemærk at opladeren ikke må være tilsluttet en stikkontakt med timer. Når opladningen er færdig, lyser alle fire lamper på opladeren. Du kan lade opladeren være tilsluttet, indtil du skal bruge kørestolen igen. Opladeren bruger ikke strøm, når kørestolen er fuldt opladet - selvom den stadig er tilsluttet stikkontakten. Når du afslutter opladningen, skal du først tage stikket ud af stikkontakten og derefter fjerne ladestikket fra kørestolen.



OBS! Opladning bør normalt vare mindst 8 timer. Helt afladene batterier tager cirka 12 timer at oplade fuldt. Afbryd ikke en igangværende opladning, før den er færdig, og alle fire lamper på opladeren lyser.

Hvis kørestolen sjældent eller aldrig bruges så meget, at batteriniveauet falder under 50 %, bør du én gang om ugen køre ekstra meget, så batteriniveauet når det røde område, før du oplader.

